



Het verwisselen  
van een ééndelig  
ileostoma  
opvangsysteem

Ileostoma  
de verzorging thuis

# Het verwisselen van een ééndelig ileostoma opvangsysteem



## Ileostoma

Een ileostoma is een gedeelte van de dunne darm dat door de buikwand naar buiten wordt gebracht, omgeklapt en in de buikhuid vastgehecht. In de meeste gevallen gebruikt de chirurg hiervoor het laatste stukje dunne darm. De productie en het volume van de ontlasting varieert per persoon en is afhankelijk van dat deel van de dunne darm dat over is na de aanleg van de stoma. De samenstelling van de ontlasting is meestal dun. De stoma is rood en vochtig net zoals de binnenkant van de wang. De stoma zelf bevat geen zenuwen en is gevoelloos.



**VOORBEREIDING:** Controleer of de opening in de huidplaat overeenkomt met de grootte van de stoma. Hiervoor kunt u een stoma-malletje gebruiken. Indien nodig past u de opening in de huidplaat aan door deze op maat te knippen. Zorg ervoor dat de opening precies op maat is, dit om te voorkomen dat de ontlasting op huid gaat irriteren.



**VERWIJDER HET ZAKJE:** Open de klem of de ingebouwde sluiting en leeg het opvangzakje in het toilet. Om opspatten te voorkomen kunt u wat toilet papier in de toiletpot neerleggen. Gebruikt u een klem bewaar deze dan. Terwijl u met één hand de buik ondersteunt, verwijdert u met uw andere hand het opvangzakje. Verwijder het materiaal voorzichtig van boven naar beneden.



**HUIDVERZORGING:** Maak een paar non-woven gaasjes vochtig met handwarm water. Reinig daarmee eerst de huid en vervolgens de stoma. Dep de huid droog met een schoon non-woven gaasje. Let erop dat de huid rondom de stoma goed droog is voordat u het nieuwe opvangsysteem aanbrengt.

U heeft nodig:

- a) Afvalzakje
- b) Droge non-woven doekjes
- c) Handwarm water
- d) Nieuw zakje
- e) Schaar (als huidplaat nog op maat geknipt dient te worden)
- f) Accessoires (mocht u deze gebruiken)



**BRENG NIEUW ZAKJE AAN:** Zorg dat de uitloop van het zakje gesloten is. Verwijder de afdekfolie van de huidplaat van het nieuwe opvangsysteem. Klap de bovenkant van het zakje voor de helft naar buiten toe om. Breng het opvangsysteem eerst aan de onderkant aan, vervolgens rond de stoma en daarna de bovenkant. Controleer of het opvangsysteem goed bevestigd is door met uw vingers vanaf het centrum van de huidplaat naar de randen toe te wrijven.



**GOOI HET OUDE ZAKJE WEG:** Klap het gebruikte opvangsysteem dubbel en stop het in een afvalzakje. Knoop dit stevig dicht en gooi het in de afvalcontainer.

**U BENT KLAAR!**



## Tips voor dagelijkse verzorging

### Meet regelmatig de diameter van uw stoma

De eerste weken na de operatie kan de stoma wat gezwollen zijn. Omdat deze zwelling geleidelijk afneemt is het vooral in deze periode van belang dat u regelmatig de diameter van uw stoma opmeet. In bijna iedere doos stoma opvangsystemen vindt u een stomamalletje ("Dansac Stoma Guide") waarmee u gemakkelijk de juiste maat kunt bepalen. Indien nodig kunt u de opening van de huidplaat aanpassen met een schaarje.

### Maximale kleefkracht

Maak de huidplaat zo soepel mogelijk door deze voor te verwarmen in bijvoorbeeld de tailleband van de kleding. Dit verzekert maximale kleefkracht, ook wanneer er huidplooiën of oneffenheden rondom de stoma zijn.

### Wees zuinig op de huid rondom de stoma

De huid rondom de stoma heeft soms veel te verduren, zeker wanneer u een gevoelige huid heeft. Belangrijk is dan dat u de huid extra verzorgt met een niet-vette huidbeschermende crème (Dansac Skin crème). De crème heel dun aanbrengen en goed in de huid masseren tot deze weer stroef aanvoelt.

### Zorg ervoor dat de huidplaat precies aansluit rondom uw stoma

Uw huid wordt optimaal beschermd wanneer u er voor zorgt dat de opening van de huidplaat precies past rondom de stoma. Is de opening te groot, dan kan de huid gaan irriteren. Is de opening te klein dan kan de stoma beschadigen en verhoogt u de kans op lekkages en huidproblemen.

### Het weggooien van een gebruikt stoma opvangsysteem

Het is een goed idee om de huidplaat van het gebruikte opvangsysteem dubbel te vouwen voordat u deze in een afvalzakje stopt. De huidplaat sluit het zakje dan af.

Zie ook onze instructiefilmpjes online: [www.dansac.nl](http://www.dansac.nl)



meten



kleefkracht



beschermen



aanbrengen



weggoien